
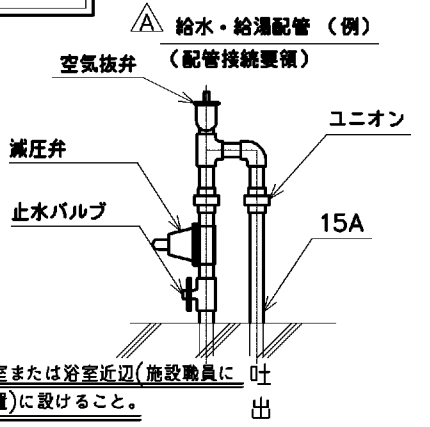


| 型式 | 品名 | 数量 | 定格電圧入力 |
|----------|--------------|----|--------|
| 1 HK-710 | リフト付きコンパクト浴槽 | 1 | 480VA |

| 記号 | 変更内容 | 担当 | 日付 |
|----|--------------|----|------------|
| △ | Δx9 感度電流変更、他 | 池上 | 2007.02.26 |

- 設備条件**
- 給湯送り配管：サイズは15A、床より30mm立ち上げ、先端はネジ加工(R1/2)、ソケット(15A)止めのこと
給湯圧100~300kPa、流量30L/min以上、給湯温度65℃以上
 - 給水送り配管：サイズは15A、床より30mm立ち上げ、先端はネジ加工(R1/2)、ソケット(15A)止めのこと
給水圧100~300kPa、流量30L/min以上
給水給湯圧力比：給水圧≧給湯圧
 - 電源：単相100V 50/60Hz 15Aアース付(アース線は第D種の規定に準ずる)
浴室外にスイッチボックスを設置のこと(FL+1500)
配電盤には単独の漏電ブレーカを設けること(感度電流30mA)
電線は600Vビニール絶縁電線(IV)1.25mm²以上を使用し、電線管はPF管を使用する。
PF管はFLより300mm立ち上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。
PF管の端末は防水処理を施すこと。
 - 排水：ピット排水(排水溝内80Aトラップ付目皿を設ける)

- 配管図**
- 給水送り配管 — — —
 - 給湯送り配管 — | —
 - 送り配線配管 — // —
- 記事**
- 指定以外の床及び室内装は、建築工事に一任とする
床面の勾配：[]内の床面の勾配は1/100以下とする。

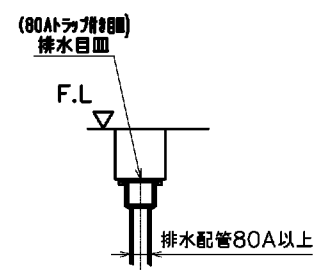

| | | | | | |
|----|------|----|--------|-----|------------|
| 尺度 | 1:30 | 図法 | 材質 | 規格 | 工事図 |
| 検図 | 設計 | 製図 | 表面・後処理 | 品番 | 品名 |
| 高岩 | 山下 | 山下 | 仕上記号 | 設計日 | 2004/04/21 |
| | | | | 機種 | HK-710 |
| | | | | 図番 | 01P300554 |

オーシー技研株式会社