



記号	変更内容	担当	日付
△x7	定格電源入力値追加、他	池上	2008/06/25
△x1	接地基準の表記変更	滝本	2011/09/05

設備条件

- 電源：AC100V10Aアース付き
 - スイッチボックスAC100V (FL+1500)
 - 配電盤には単独の感電防止用漏電遮断器を設ける(感度電流30mA)こと。
 - 電線は600Vビニル絶縁電線(IV)2.0mm、3芯
電流量10A以上を使用し、PF管にて所定の位置まで配電すること。
 - △ アース線はD種の規定に準ずること。
 - PF管はFLより300mm立上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。
 - PF管の端末は防水処理を施すこと。
- 床面の勾配
 - 内の床面の勾配は1/100以下とする。
- 浴槽の形状
 - 浴槽の縁の高さ：FL+50~300mm
 - 浴槽の縁の幅：130~250mm
 - 浴槽の奥行き：足を伸ばして入浴の場合 1700mm以上(手摺を含む)
足を縮めて入浴の場合 1500mm以上(手摺を含む)
- その他
 - 換気、照明、給湯、排水等指定なき諸設備については建築設計事務所に一任する。

記号	型式	品名	数量	定格電源入力(50/60Hz)
①	RA-580	本体	1	330VA
②	RA-581	搬送車	1	-

材質	規格	品番	工事名
	RA-580		
図法	設計	製図	数量・検算
1:30	池上	池上	池上
図番	設計日	機種	図番
武	2007/08/13	RA-580	01P200477
奥野		オージー技術株式会社	